

Gefeliciteerd, hulp is vanaf nu, met 1 drukknop verzorgd.

Er is Hulp nodig, druk op de rode knop van het systeem of op de rode knop van hanger.

U hoeft verder niets meer te doen



Het systeem vertelt u (middels een spraakchip) dat u de alarmknop hebt ingedrukt en dat een spreekluisterverbinding wordt opgebouwd.



Een familielid, een goede buur, kennis of goede vriend wordt direct door het systeem opgebeld en ontvangt ook een SMS boodschap (bijvoorbeeld: "Zorgoproep OMA")



De persoon die door het systeem wordt gebeld kan direct met u spreken, door de gevoelige ingebouwde microfoon en speaker zal de communicatie luid en duidelijk zijn op zeker 7 meter afstand van het Zorgsysteem.



De persoon die u spreekt kan direct actie ondernemen of indien nodig hulp van derden inroepen, deze persoon weet ook waar de sleutel van uw woning is om eventueel naar binnen te gaan.



Als een derde de woning is binnengekomen, drukt deze op de groene knop, een spreekluisterverbinding met de eerste persoon wordt weer opgebouwd zodat er middels een goede communicatie samen gewerkt kan worden (Er kan dan eventueel een dokter of ambulance gewaarschuwd worden).

Ook ontvangt de eerste persoon een SMS bericht met de tekst "hulp gearriveerd".



Wanneer de hulpverlener klaar is met de hulpverlening, drukt deze voor een laatste maat op de groene knop (er wordt dan een SMS verzonden met de tekst "hulpverlening is verricht" en een spreekluisterverbinding wordt weer opgebouwd om nog even naar elkaar verslag uit te brengen van deze hulpverlening).

